

Autocoleta vaginal

Componentes	Coletor vaginal Veil	
	Tubo	

Instruções

- Identificar a embalagem com os dados pessoais da paciente.
- Lavar as mãos com água e sabão.
- Abriu o kit e pegar o componente Coletor Veil (A) e o aplicador (B). Não separar as partes antes de realizar a autocoleta.
- Após encontrar uma posição confortável, com a ajuda do aplicador (B), introduza o Coletor Veil (A) na vagina, deixando a parte terminal em V para fora (essa parte servirá para retirar o coletor após o uso). Uma vez que o Coletor Veil (A) esteja bem posicionado, retire o aplicador (B) e deixar o Veil dentro da vagina.
- O Coletor Veil (A) deve permanecer na vagina por 5-10 minutos.

Certifique-se de que a parte terminal em forma de V do coletor Veil permanece fora da vagina.
- Durante os 5-10 minutos, é possível realizar quaisquer movimentos.
- Após 5-10 minutos, lavar as mãos com água e sabão.
- Colocar o tubo (C) sobre uma superfície plana (não fechar o tubo até inserir o coletor).
- Armazenar o Coletor Veil (A) no tubo (C). Fechar o tubo (C) rosqueando a tampa corretamente. Uma vez fechado, não tentar abrir novamente. Manter o kit refrigerado (2° a 8°C) até o momento da entrega.
- Colocar o tubo (C) com a amostra no saco com fecho ziplock.
- Armazenar em local limpo e seco. Manter longe de fontes de calor. Após a coleta, manter o kit refrigerado (2° a 8°C) até o momento da entrega.

Autocoleta vaginal

QUANDO PODE SER USADO ESSE KIT?

Este dispositivo é indicado para coleta de amostra da cavidade vaginal.

MUITO IMPORTANTE:

Relaxe e escolha a posição mais confortável para você (sentada com as pernas abertas, em pé com uma perna levantada ou em pé com as pernas levemente flexionadas). Separe os lábios localizados na abertura da vagina. Introduza cuidadosamente o Veil com o seu aplicador. Continue empurrando o Veil e o aplicador em direção à área de aderência. A parte terminal em forma de V deve ficar pendurada livremente na parte externa da vagina. Após a introdução do Veil, retire o aplicador da vagina.

CUIDADO:

Para retirar o aplicador, puxe-o levemente com cuidado para não puxar o Veil. Elimine o aplicador usado com o lixo infectante ou o doméstico normal. Dependendo do tamanho da vagina e de como o Veil intravaginal foi inserido, é obrigatório que a parte terminal em forma de V permaneça visível para que possa ser removida após o uso.

COMO REMOVER O VEIL?

Lave as mãos e seque-as com um pano limpo. Relaxe e escolha a posição que mais lhe convier (sentada com as pernas afastadas, em pé com uma perna para cima ou com as pernas dobradas). O Veil é facilmente removido puxando a parte em forma de V. Insira o Veil no frasco adicional não fornecido. Uma vez devidamente fechado, não tente abri-lo novamente.

RECOMENDAÇÕES E DICAS:

- Lave adequadamente as mãos antes de usar esse dispositivo de coleta.
- Não use se você teve atividade sexual nos últimos 2 dias.
- Não use se você fez uma lavagem vaginal nas últimas 48 horas.
- Se estiver grávida ou tiver sangue na cavidade vaginal, use esse dispositivo de coleta apenas sob recomendação do seu médico.
- O Veil não pode e não deve permanecer na vagina por mais de 30 minutos, mas se você esquecer de retirá-lo, retire-o assim que se lembrar.
- Use apenas um Veil de cada vez.
- Não reutilize o Veil, mesmo que não esteja impregnado com fluidos corporais.
- Para mais recomendações, pergunte ao seu médico.
- Não descarte o produto no meio ambiente.

PARA QUEM ESTE PRODUTO É ESTRITAMENTE PROIBIDO? Para pessoas que:

- Têm febre ou sintomas semelhantes aos da gripe, mesmo que sejam leves.
- Possuem experiência prévia com choque tóxico.
- Têm alergia a plásticos e derivados.
- Sejam menores de 18 anos.

TESTES REALIZADOS NO VEIL:

- Citotoxicidade (sem efeito citotóxico potencial).
- Sensibilização (sem efeito potencial de sensibilização).
- Irritação vaginal (durante 5 dias consecutivos sem efeito potencialmente irritante ao tecido vaginal).
- Capacidade de absorção do Veil (1,4 g).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SÍNDROME DE CHOQUE TÓXICO:

A síndrome do choque tóxico (SCT) é uma infecção rara, mas potencialmente perigosa. Pode acontecer com crianças, homens e mulheres (com ou sem menstruação). É causada por uma toxina produzida por uma bactéria (*Staphylococcus*) comumente encontrada no corpo humano. Metade dos casos de SCT conhecidos até hoje ocorreram entre mulheres e adolescentes menstruadas. A SCT está associada ao uso de absorvente interno, mas também pode ocorrer em períodos em que são utilizados outros meios de proteção (protetores menstruais, absorventes íntimos, etc.). A SCT é uma infecção que pode ser mortal, por isso deve ser identificada muito cedo e curada rapidamente. Os sintomas da SCT podem aparecer repentinamente durante os períodos e podem não aparecer todos simultaneamente: febre repentina, vômitos, diarreia, dor de garganta, tontura, desmaio, dores musculares, erupção cutânea que se assemelha a uma queimadura solar (a pele pode descascar alguns dias depois). Se tiver esses sintomas, deve retirar o Veil, dirigir-se ao seu médico ou ao médico mais próximo disponível, indicando que está menstruada. A SCT pode ocorrer com ou sem o uso do Veil. Se você já teve a SCT, pergunte ao seu médico se você pode usar o Veil. Se você usar o Veil corretamente e respeitar essas recomendações, o risco de desenvolver a SCT diminui.

CONSERVAÇÃO:

Armazenar em local limpo e seco. Manter longe de fontes de calor. Após a coleta, manter o kit refrigerado (2 a 8°C) até o momento da entrega.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:

Não use o produto se a embalagem estiver danificada ou após a data de validade. Se, apesar de todo o cuidado que dedicamos à fabricação de nossos produtos, você achar que tem um produto com defeito, não o utilize e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor ou o distribuidor, indicando com precisão o problema encontrado, bem como o número do lote especificado na embalagem.



Ficou com dúvidas?
Aponte a câmera do seu celular para o QRcode do lado e assista ao vídeo

IMPORTADOR:

Mobius Life Science Comércio de Produto para Laboratórios Ltda
Rua Jandáia do Sul 441 Pinhalis-PR CEP: 83324-440
Telefone: (41) 3401-1850
Rua Paralelo do Norte, 866 - Pinhalis - PR - CEP: 83324-221
Telefone: (41) 3401-1850 | 0800-701850
E-mail: suporte@mobiuslife.com.br | Website: www.mobiuslife.com.br
CNPJ: 04.645.160/0001-49